

## PROCEDURE DE TEST


*Comment procéder:*



1. Ajouter 100 µL de Diluant Echantillon/Contrôle Négatif (1er repère) au tube de conjugué. Passer au vortex ou agiter par rotation le contenu des tubes pendant 10 secondes.




2. Mélanger l'échantillon de patient avec soin. Aspirer l'échantillon jusqu'au 1er repère de la pipette de transfert (100 µL) et l'ajouter au tube de conjugué. Mélanger en aspirant et pressant 3 fois sur la poire de la pipette ou passer au vortex pendant 10 secondes.

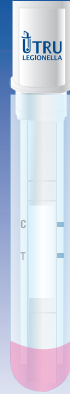


3. Insérer la bandelette de test dans le tube et fermer. Incuber à 19-27 C pendant 20 minutes. Lire les résultats dans la minute.


## RESULTATS

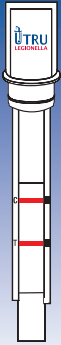

**POS**  
(+)

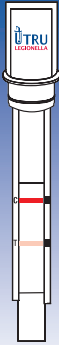


**POS FAIBLE**  
Pos (+)

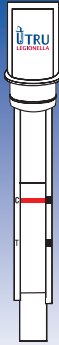

**NEG**  
(-)



**NON VALIDE**

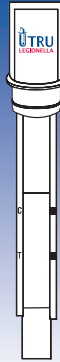

### TEST DE CONTROLES EXTERNES:

1. Contrôle Positif: ajouter exactement 5 gouttes de Contrôle Positif au tube de conjugué marqué Contrôle Positif.
2. Diluant Echantillon/Contrôle Négatif: ajouter 200 µL (2e repère) au tube de conjugué de Contrôle Négatif.
3. Passer au vortex ou agiter par rotation le contenu des tubes pendant 10 secondes.
4. Insérer la bandelette réactive dans chaque tube de conjugué et bien reboucher le tube. Incuber les tubes à une température entre 19 et 27 C pendant 20 minutes.



Cette procédure résumée est représentative de la notice au moment de sa publication.  
Pour des instructions complètes, se référer à la notice la plus récente.

© 2011 SN1180 REV. 05/15

**FR-2015-09-24**

**USA/CORPORATE OFFICE**  
3471 River Hills Drive  
Cincinnati, Ohio 45244 USA  
Telephone: 513.271.3700

Orders / Customer Service: 1.800.543.1980  
Technical Support: 1.800.343.3858  
Information Fax: 513.272.5432  
Ordering Fax: 513.271.0124  
www.meridianbioscience.com

### MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE

Belgium/Luxemburg Tel: +32 (0) 67 89 59 59  
France Tel: +33 (0) 1 42 56 04 40  
Germany Tel: +49 (0) 3371 681 500  
Italy Tel: +39 0331 43 3636  
Netherlands Tel: +31 (0) 411 62 11 66  
United Kingdom Tel: +44 (0) 20 8453 7970

 **Meridian**  
**Bioscience, Inc.**  
Inspired Science. Trusted Solutions.™